

3-PART ELECTRIC LIFT COLUMN /

TISCHE MIT DREITEILIGER

ELEKTRISCHER HUBSÄULE

601396

The lifting column only moves down and not up.

- Disconnect the lifting column from the power supply. Wait a short moment and plug the column back into the mains.
- Lower the lift halls completely, release the switch for a moment then and press the switch continuously until you hear a clicking noise.

Die Hubsäule fährt nur runter und nicht rauf.

- Trennen Sie die Hubsäule von der Stromversorgung. Warten Sie einen kurzen Moment und stecken die Säule wieder ans Netz.
- Fahren Sie die Hubsäule ganz herunter, lassen Sie den Schalter kurz los und betätigen Sie den Schalter durchgehend, bis Sie ein klackendes Geräusch hören.

EICKEMEYER®**GERMANY** | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk**DENMARK** | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Denmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk**NETHERLANDS** | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl**ITALY** | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it**POLAND** | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 022 185 55 76 | F 022 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl**CANADA** | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyerveterinary.com