

## LifeVet 8M, 8C, 12M

321900, 321901, 321910

---

**Problem:**

**Weight is always < 10 kg although a higher weight is set in patient management.**

Solution: The weight specification < 10 kg can only be changed in the blood pressure measurement menu and is independent of the entered patient weight.

---

---

**Problem:**

**Gewicht immer < 10 kg, obwohl höheres Gewicht bei der Patientenaufnahme eingegeben wurde.**

Lösung: Die Gewichtsangabe < 10 kg kann nur im Menü der Blutdruckmessung verändert werden und ist unabhängig von dem eingegebenen Patientengewicht.

---

---

**EICKEMEYER®**

**GERMANY** | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

**DENMARK** | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

**NETHERLANDS** | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

**ITALY** | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

**POLAND** | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

**CANADA** | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca